

# Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



SAFETY AT WORK

## Plum QuickRinse - pour les petits accidents

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse est un produit stérile destiné aux premiers soins pour le lavage des plaies et des yeux.

Le produit peut être utilisé pour le lavage :

- La poussière
- Salissures
- Corps étrangers



Les ampoules Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse sont conçues spécialement pour évacuer les petites particules étrangères qui peuvent être retirées avec une petite quantité de liquide. Ces ampoules présentent un grand avantage : leur praticité. En effet, il suffit simplement d'ouvrir une dosette unique plutôt qu'une bouteille en grand format.

### CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Élimine efficacement la poussière et la saleté dans les yeux
- Facile à manipuler - facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide
- Durée de conservation de 3,5 ans



Il s'agit d'une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % qui soulage l'inconfort et prévient les complications ultérieures causées par les corps étrangers.

# Une solution douce

Cette solution salée de chlorure de sodium à 0,9 % est identique aux larmes de l'œil humain. Elle est ainsi douce et confortable pour l'utilisateur, réduisant toute sensation désagréable lors du rinçage.

## MODE D'EMPLOI

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse est facile à utiliser. Suivez les étapes suivantes :



**Étape 1 :** Faire pivoter l'ampoule pour l'ouvrir.



**Étape 2 :** Rincer l'œil ou la plaie



**Étape 3 :** Jeter l'ampoule vide.



### 5 X 20 ML RECHARGE PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE

5 ampoules de 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou en tant que recharge pour distributeur Plum QuickSafe®, QuickFix&Rinse ou QuickRinse.

**Contenu :** 5 x 20 ml  
**Conditionnement :** 4 x 5 x 20 ml  
**Réf. :** 5160



### PLUM QUICKRINSE

Distributeur contenant 10 ampoules de 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %.

**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 4632  
**Réf. recharge :** 5160



### PLUM QUICKFIX&RINSE

Distributeur contenant 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de chlorure de sodium stérile à 0,9 %.

**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 4631  
**Réf. recharge :** 5512 & 5160



### PLUM QUICKFIX DISTRIBUTEUR VIDE

Distributeur sans recharge. Doit être rempli avec une recharge Plum QuickFix ou Plum QuickRinse recharge de votre choix.

**Conditionnement :** 10  
**Réf. :** 5500

info@plum.eu  
+45 6916 9600