



Wundversorgung und Augenspülung bei Fremdkörpern


Dieses Wund- und Augenspülmittel ist eine sterile 0,9%ige Natriumchloridlösung, die Beschwerden lindert und Folgekomplikationen durch Fremdkörper in Wunden oder Augen verhindert.

PRODUKTFAKTEN & VORTEILE

- Entfernt effektiv Staub, Schmutz und Verunreinigungen aus Wunden oder Augen.
- Einfach zu handhaben - entweder von der verletzten Person selbst oder mit Hilfe
- Flexible Lösungen – Flaschen für den mobilen Einsatz und Stationen für die Wandmontage
- Breites Anwendungsspektrum - von Industriearbeitsplätzen bis hin zu Labors und Erste-Hilfe-Sets
- Hohe Funktionssicherheit
- CE-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien zur Klassifizierung der Medical Device Regulation (EU) 2017/745
- Haltbarkeit von 3,5 Jahren



Kombinieren Sie Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate an Arbeitsplätzen wo ein Unfallrisiko mit Chemikalien besteht

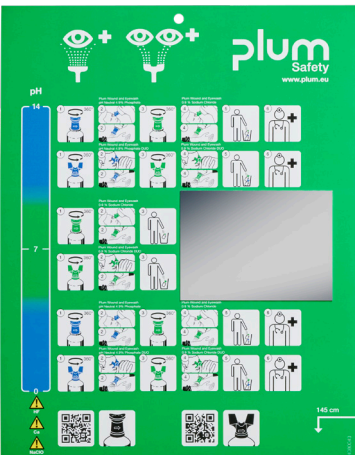

Informieren Sie sich über Ihre Chemikalien und sorgen Sie für die passende Erste Hilfe.

Die Ursache eines Unfalls bestimmt, welche Wund- oder Augenspülung erforderlich ist. Bei einem Unfall muss unbedingt festgestellt werden, ob er durch einen Fremdkörper oder durch Säuren oder Alkali verursacht wurde – und wenn möglich, welchen pH-Wert die betreffende Substanz hat.

Wenn der pH-Wert entweder stark sauer oder alkalisch ist, spülen Sie zuerst mit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie die Flasche und spülen Sie mit der Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Ist der pH-Wert neutral, spülen Sie mit Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie diese anschließend.

ERGONOMISCHER AUGENAUFSATZ

Die Form der Augenaufsätze helfen dabei, die richtige Flüssigkeitsmenge und Spülzeit sicherzustellen. Drücken Sie die Flasche leicht zusammen, um einen weichen und angenehmen Strahl zu erzeugen.

AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das Augenlid während des Gebrauchs offen hält

DUO AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht



Hinweis:

Für die Wundspülung ist die Form der Augenmuschel irrelevant.

VERFÜGBARE GRÖSSEN

| Art.-Nr. | AUGENAUFSATZ | 4691 | 4604 | 4707 | DUO AUGENAUFSATZ | 4861 | 4800 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Inhalt | | 200 ml | 500 ml | 1000 ml | | 500 ml | 1000 ml |
| Verpackung | | 10 x 200 ml | 12 x 500 ml | 6 x 1000 ml | | 6 x 500 ml | 6 x 1000 ml |

KONTAKT

info@plum-deutschland.de
+49 4721 681801