



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL



Un accès rapide à un lave œil et plaies neutralisant est crucial en cas de accidents chimiques

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate est une solution de tampon permettant de neutraliser rapidement et efficacement les produits les plus fortement acides ou alcalins

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS

- Effet neutralisant rapide - minimise l'impact des accidents avec des acides et des alcalis
- Facile à manipuler - facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide
- Solutions flexibles - flacons pour une utilisation mobile et stations pour montage mural
- Diverses applications - des postes de travail industriels aux laboratoires, en passant par les trousse de premiers soins
- Haute fiabilité fonctionnelle
- Marquage CE selon les directives de classification du Medical Device Regulation (EU) 2017/745
- Durée de conservation de 3,5 ans



TAILLES DISPONIBLES

Réf.	4752	4755 - emballage individuel	4801
Contenu	CEILLERE 200 ml	200 ml	CEILLERE DUO 500 ml
Conditionnement	10 x 200 ml	10 x 200 ml	6 x 500 ml


Optimisez la sécurité grâce à une solution de lavage des plaies et des yeux rapide, efficace et accessible.

Figure 1 : Neutralisation par Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et par une solution de Chlorure de Sodium 0.9%*

L'utilisation du tampon Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate neutralise rapidement la valeur du pH du produit chimique à un niveau inoffensif.

Un effet neutralisant rapide est essentiel pour minimiser l'impact d'un accident avec des acides et des alcalis.

Le rinçage de la plaie ou de l'œil avec de l'eau ordinaire ou avec la solution Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride ne produit qu'un effet de dilution et de rinçage (voir figure 1).

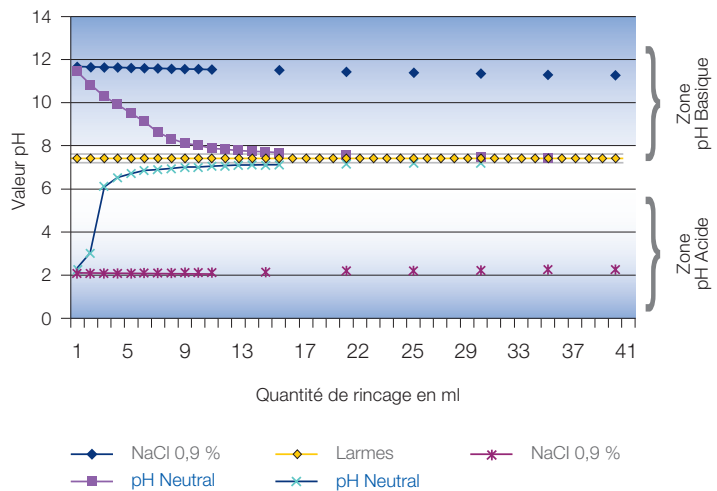

Après avoir utilisé Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, continuez le rinçage au Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à consultation d'un médecin.

1 : Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Osterheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag : Augenverätzungen. Quoi de neuf ? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.
 2 : Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Osterheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanarienvögeln im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

ŒILLERES ERGONOMIQUES

Les flacons sont équipés de différents types d'œillères ergonomiques pour garantir la correcte application de la solution dans un débit uniforme. Pressez doucement le flacon pour générer un flux de liquide fin et régulier.

ŒILLERE



Œillère flexible et ergonomique qui maintient la paupière ouverte pendant l'utilisation

ŒILLERE DUO



Œillère flexible et ergonomique qui permet de rincer les deux yeux en même temps



Remarque :
Pour l'irrigation des plaies, la forme de l'œilleton n'a aucune importance.

IMPORTANT

⚠ HF ⚠ Ca ⚠ NaClO

Ne pas utiliser ce produit en cas d'éclaboussures contenant de l'acide fluorhydrique, du calcium ou de l'hypochlorite de sodium (substances blanchissantes).

info@plum.eu
+45 6916 9600

